

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° M21- 066623

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 787 Société : Royal Air Maroc  
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :  
 Nom & Prénom : MOUSSATO Mohamed  
 Date de naissance : 01-01-1947  
 Adresse : Hay HLY Rachid 1 Bte 1 Rue 11e N° 19 Casablanca  
 Tél. : 0640352955 Total des frais engagés : 1044,45 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 6/5/2022  
 Nom et prénom du malade : MOUSSATO Mohamed Age : 1947  
 Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant  
 Nature de la maladie : ESCARTE SUTURE  
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Signature de l'adhérent(e) : Le : / /

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019



# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
6-5-22			6	

# EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	6/05/22	8640

# ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

# AUXILIAIRES MEDICAUX

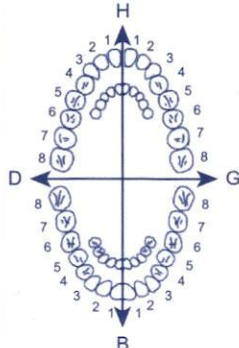
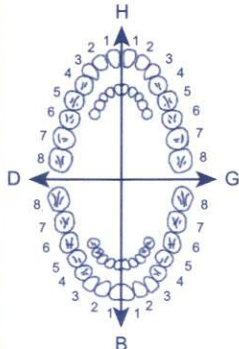
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
	09/05/22					180,45

# RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient															
				Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>														
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>														
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>														
O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE																	
	<table border="1"> <tr> <td>H</td> <td>H</td> </tr> <tr> <td>25533412</td> <td>21433552</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>G</td> </tr> <tr> <td>00000000</td> <td>00000000</td> </tr> <tr> <td>35533411</td> <td>11433553</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> </tr> </table>		H	H	25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B			Coefficient DES TRAVAUX <input type="text"/>
	H	H																
	25533412	21433552																
	00000000	00000000																
	D	G																
	00000000	00000000																
	35533411	11433553																
	B																	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>														
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>														
			DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>															

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION



INPE : 090002445

REANIMATION MEDICO-CHIRURGICALE / CHIRURGIE VISCERALE / COELO CHIRURGIE  
 NEURO-CHIRURGIE / CHIRURGIE VASCULAIRE / CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE  
 CHIRURGIE UROLOGIQUE - LITHO TRYPSIE / CHIRURGIE OTO-RHINO - LARYNGOLOGIQUE  
 CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE / CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE  
 CHIRURGIE TRAUMATOLOGIQUE ET ORTHOPEDIQUE  
 CHIRURGIE PLASTIQUE-REPARATRICE

DOCTEUR

CASABLANCA Le :

6/5/22

Ma Moussemmi Mohamed

Tél: 0522 227 552  
 24, Rue Imam Aloussi - Bourgogne  
 Casablanca

Classe anti ESCAR

\* VP 60 SORB x  
 288 x 3

S.P.

Smir locum

S.V.

864, 18/12

PHARMACIE ESSAAD  
 CASABLANCA SARLAT  
 MOUNIB Mohammed  
 2, Av. Ali Yafa Hay Mohammed  
 Casablanca  
 Tél: 0522 62 03 53 / 62 54 13

24, Rue Imam Aloussi - Bourgogne  
 Casablanca  
 Tél: 0522 227 552  
 24, Rue Imam Aloussi - Bourgogne  
 Casablanca

**URGENCES 24/24**



# UrgoSorb

FR

COMPRESSE ET MÈCHE  
PANSEMENT ABSORBANT ALGinate / HYDROCOLLOÏDE

## DESCRIPTION

**UrgoSorb** est un pansement stérile composé de fibres d'alginate de calcium et de particules hydrocolloïdes (carboxyméthylcellulose sodique), polymères d'origine naturelle connus pour leur fort pouvoir d'absorption.

## PROPRIÉTÉS

**UrgoSorb** est un pansement favorisant la cicatrisation par gélification de ses composants au contact des exsudats de la plaie.

**UrgoSorb** se retire facilement, même hydraté, sans douleur et d'un seul tenant.

## INDICATIONS

**CICATRISATION :** **UrgoSorb** est un pansement destiné aux soins locaux des plaies moyennement à fortement exsudatives en phase de détersion et de bourgeonnement notamment : plaies post-chirurgicales (moignons d'amputations, cavités abcdées ...), plaies chroniques (escarres de décubitus, ulcères de jambes...). **UrgoSorb** peut être utilisé sur des plaies présentant des signes cliniques d'infection sous réserve d'une surveillance médicale appropriée. **UrgoSorb** est également indiqué dans les plaies hémorragiques. **UrgoSorb** mèche est destiné aux soins locaux des plaies cavitaires ou tunnelisées (escarres profondes, anfractueuses, sinus pilonidaux).

**HEMOSTASE :** Par activation plaquettaire, **UrgoSorb** est un pansement favorisant l'hémostase primaire des plaies aiguës et chroniques présentant un saignement.

**UrgoSorb** mèche est destiné aux soins locaux des plaies cavitaires hémorragiques.

## MODE D'EMPLOI

• **Préparation de la plaie :** Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique. Après utilisation d'antibiotiques, de corticoïdes ou de solutions antiseptiques alcalines, rincer avec du sérum physiologique. Sécher le pourtour avec une compresse stérile.

• **Application du pansement :** Appliquer **UrgoSorb** directement sur la plaie. Dans le cas de l'ulcère de jambe, une humidification de la compresse en regard de la plaie avec une solution de sérum physiologique peut être réalisée. Assurer le maintien d'**UrgoSorb** à l'aide d'un pansement secondaire (compresses et bande de fixation). En cas d'escarre sacrée et d'incontinence, recouvrir d'un pansement hydrocolloïde extra-mince. Jeter toute partie non utilisée selon les procédures et directives locales.

• **Changement du pansement :** Le pansement **UrgoSorb** sera renouvelé lorsqu'il est saturé. Cette fréquence de renouvellement est de une fois par jour en cas de détersion de débris fibrino-nécrotiques et de plaie fortement exsudative ou infectée, à tous les 2 jours en cas de plaie moyennement exsudative.

• **Retrait du pansement :** Oter le pansement secondaire et retirer **UrgoSorb**. Dans l'ulcère de jambe, **UrgoSorb** peut être humidifié à l'aide de sérum physiologique pour en faciliter le retrait. Appliquer un nouveau pansement **UrgoSorb** comme précédemment décrit.

• **Utilisation d'**UrgoSorb** mèche :** Pour les plaies cavitaires et profondes (escarres anfractueuses) appliquer **UrgoSorb** mèche de façon lâche sans exercer de pression excessive. En se gélifiant, **UrgoSorb** mèche se conforme aux parois de la cavité. **UrgoSorb** mèche se retire facilement d'un seul tenant. S'assurer du retrait de la totalité de la mèche dans la plaie. Utiliser les mêmes techniques de pansement secondaire qu'avec **UrgoSorb** compresse.

## CONTRE-INDICATIONS

Mèche endo-nasal en chirurgie rhino sinusienne. Plaque de nécrose sèche de l'escarre. Brûlures profondes, brûlures de 3e degré. Plaies peu exsudatives. Sensibilité connue au pansement.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Non résorbable, **UrgoSorb** ne doit pas être utilisé comme compresse chirurgicale implantable.

• Ne pas associer les pansements **UrgoSorb** avec des solutions antiseptiques alcalines (incompatibilité physico-chimique). En cas d'utilisation, rincer la plaie avec du sérum physiologique avant d'appliquer **UrgoSorb** compresse et mèche.

• Conditionnement individuel stérile à usage unique: La réutilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.

• (\*) Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

• Ne pas re-stériliser.

EN

COMPRESS AND ROPE  
ALGinate / HYDROCOLLOID ABSORBENT DRESSING

## DESCRIPTION

**UrgoSorb** is a sterile dressing composed of calcium alginate fibres and hydrocolloid particles (sodium carboxymethylcellulose), natural polymers known for their high absorbency.

## PROPERTIES

**UrgoSorb** is a dressing which promotes wound healing by means of its components forming a gel on contact with wound exudate.

**UrgoSorb** provides pain-free dressing change and can be removed easily and in one piece, even when wet.

## INDICATIONS

**WOUND HEALING:** **UrgoSorb** is a dressing intended for local treatment of moderate to highly exuding wounds, particularly for sloughy and granulating wounds: Post surgical wounds (amputation stumps, cavity wounds...). Chronic wounds (pressure ulcers, leg ulcers...). **UrgoSorb** can be used on wounds with signs of clinical infection under medical supervision. **UrgoSorb** is also intended for moderate to heavily exuding wounds. **UrgoSorb** rope is intended for the local management of moderate to heavily exuding cavity (deep eschars, pilonidal sinus) wounds.

**HAEMOSTASIS:** Through platelet activation, **UrgoSorb** is a dressing which promotes primary haemostasis and can control minor bleeding in superficial acute and chronic wounds, through the natural haemostatic properties of calcium alginate.

# UrgoSorb

FR

COMPRESSE ET MÈCHE  
PANSEMENT ABSORBANT ALGinate / HYDROCOLLOÏDE

## DESCRIPTION

**UrgoSorb** est un pansement stérile composé de fibres d'alginate de calcium et de particules hydrocolloïdes (carboxyméthylcellulose sodique), polymères d'origine naturelle connus pour leur fort pouvoir d'absorption.

## PROPRIÉTÉS

**UrgoSorb** est un pansement favorisant la cicatrisation par gélification de ses composants au contact des exsudats de la plaie.

**UrgoSorb** se retire facilement, même hydraté, sans douleur et d'un seul tenant.

## INDICATIONS

**CICATRISATION :** **UrgoSorb** est un pansement destiné aux soins locaux des plaies moyennement à fortement exsudatives en phase de détersion et de bourgeonnement notamment : plaies post-chirurgicales (moignons d'amputations, cavités abcdées ...), plaies chroniques (escarres de décubitus, ulcères de jambes...). **UrgoSorb** peut être utilisé sur des plaies présentant des signes cliniques d'infection sous réserve d'une surveillance médicale appropriée. **UrgoSorb** est également indiqué dans les plaies hémorragiques. **UrgoSorb** mèche est destiné aux soins locaux des plaies cavitaires ou tunnelisées (escarres profondes, anfractueuses, sinus pilonidaux).

**HEMOSTASE :** Par activation plaquettaire, **UrgoSorb** est un pansement favorisant l'hémostase primaire des plaies aiguës et chroniques présentant un saignement.

**UrgoSorb** mèche est destiné aux soins locaux des plaies cavitaires hémorragiques.

## MODE D'EMPLOI

• **Préparation de la plaie :** Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique. Après utilisation d'antibiotiques, de corticoïdes ou de solutions antiseptiques alcalines, rincer avec du sérum physiologique. Sécher le pourtour avec une compresse stérile.

• **Application du pansement :** Appliquer **UrgoSorb** directement sur la plaie. Dans le cas de l'ulcère de jambe, une humidification de la compresse en regard de la plaie avec une solution de sérum physiologique peut être réalisée. Assurer le maintien d'**UrgoSorb** à l'aide d'un pansement secondaire (compresses et bande de fixation). En cas d'escarre sacrée et d'incontinence, recouvrir d'un pansement hydrocolloïde extra-mince. Jeter toute partie non utilisée selon les procédures et directives locales.

• **Changement du pansement :** Le pansement **UrgoSorb** sera renouvelé lorsqu'il est saturé. Cette fréquence de renouvellement est de une fois par jour en cas de détersion de débris fibrino-nécrotiques et de plaie fortement exsudative ou infectée, à tous les 2 jours en cas de plaie moyennement exsudative.

• **Retrait du pansement :** Oter le pansement secondaire et retirer **UrgoSorb**. Dans l'ulcère de jambe, **UrgoSorb** peut être humidifié à l'aide de sérum physiologique pour en faciliter le retrait. Appliquer un nouveau pansement **UrgoSorb** comme précédemment décrit.

• **Utilisation d'**UrgoSorb** mèche :** Pour les plaies cavitaires et profondes (escarres anfractueuses) appliquer **UrgoSorb** mèche de façon lâche sans exercer de pression excessive. En se gélifiant, **UrgoSorb** mèche se conforme aux parois de la cavité. **UrgoSorb** mèche se retire facilement d'un seul tenant. S'assurer du retrait de la totalité de la mèche dans la plaie. Utiliser les mêmes techniques de pansement secondaire qu'avec **UrgoSorb** compresse.

## CONTRE-INDICATIONS

Mèche endo-nasal en chirurgie rhino sinusienne. Plaque de nécrose sèche de l'escarre. Brûlures profondes, brûlures de 3e degré. Plaies peu exsudatives. Sensibilité connue au pansement.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Non résorbable, **UrgoSorb** ne doit pas être utilisé comme compresse chirurgicale implantable.

• Ne pas associer les pansements **UrgoSorb** avec des solutions antiseptiques alcalines (incompatibilité physico-chimique). En cas d'utilisation, rincer la plaie avec du sérum physiologique avant d'appliquer **UrgoSorb** compresse et mèche.

• Conditionnement individuel stérile à usage unique: La réutilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.

• (\*) Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

• Ne pas re-stériliser.

EN

COMPRESS AND ROPE  
ALGinate / HYDROCOLLOID ABSORBENT DRESSING

## DESCRIPTION

**UrgoSorb** is a sterile dressing composed of calcium alginate fibres and hydrocolloid particles (sodium carboxymethylcellulose), natural polymers known for their high absorbency.

## PROPERTIES

**UrgoSorb** is a dressing which promotes wound healing by means of its components forming a gel on contact with wound exudate.

**UrgoSorb** provides pain-free dressing change and can be removed easily and in one piece, even when wet.

## INDICATIONS

**WOUND HEALING:** **UrgoSorb** is a dressing intended for local treatment of moderate to highly exuding wounds, particularly for sloughy and granulating wounds: Post surgical wounds (amputation stumps, cavity wounds...). Chronic wounds (pressure ulcers, leg ulcers...). **UrgoSorb** can be used on wounds with signs of clinical infection under medical supervision. **UrgoSorb** is also intended for moderate to heavily exuding wounds. **UrgoSorb** rope is intended for the local management of moderate to heavily exuding cavity (deep eschars, pilonidal sinus) wounds.

**HAEMOSTASIS:** Through platelet activation, **UrgoSorb** is a dressing which promotes primary haemostasis and can control minor bleeding in superficial acute and chronic wounds, through the natural haemostatic properties of calcium alginate.



# UrgoSorb

FR

COMPRESSE ET MÈCHE  
PANSEMENT ABSORBANT ALGinate / HYDROCOLLOÏDE

## DESCRIPTION

**UrgoSorb** est un pansement stérile composé de fibres d'alginate de calcium et de particules hydrocolloïdes (carboxyméthylcellulose sodique), polymères d'origine naturelle connus pour leur fort pouvoir d'absorption.

## PROPRIÉTÉS

**UrgoSorb** est un pansement favorisant la cicatrisation par gélification de ses composants au contact des exsudats de la plaie.

**UrgoSorb** se retire facilement, même hydraté, sans douleur et d'un seul tenant.

## INDICATIONS

**CICATRISATION :** **UrgoSorb** est un pansement destiné aux soins locaux des plaies moyennement à fortement exsudatives en phase de détersion et de bourgeonnement notamment : plaies post-chirurgicales (moignons d'amputations, cavités abcdées ...), plaies chroniques (escarres de décubitus, ulcères de jambes...). **UrgoSorb** peut être utilisé sur des plaies présentant des signes cliniques d'infection sous réserve d'une surveillance médicale appropriée. **UrgoSorb** est également indiqué dans les plaies hémorragiques. **UrgoSorb** mèche est destiné aux soins locaux des plaies cavitaires ou tunnelisées (escarres profondes, anfractueuses, sinus pilonidaux).

**HEMOSTASE :** Par activation plaquettaire, **UrgoSorb** est un pansement favorisant l'hémostase primaire des plaies aiguës et chroniques présentant un saignement.

**UrgoSorb** mèche est destiné aux soins locaux des plaies cavitaires hémorragiques.

## MODE D'EMPLOI

• **Préparation de la plaie :** Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique. Après utilisation d'antibiotiques, de corticoïdes ou de solutions antiseptiques alcalines, rincer avec du sérum physiologique. Sécher le pourtour avec une compresse stérile.

• **Application du pansement :** Appliquer **UrgoSorb** directement sur la plaie. Dans le cas de l'ulcère de jambe, une humidification de la compresse en regard de la plaie avec une solution de sérum physiologique peut être réalisée. Assurer le maintien d'**UrgoSorb** à l'aide d'un pansement secondaire (compresses et bande de fixation). En cas d'escarre sacrée et d'incontinence, recouvrir d'un pansement hydrocolloïde extra-mince. Jeter toute partie non utilisée selon les procédures et directives locales.

• **Changement du pansement :** Le pansement **UrgoSorb** sera renouvelé lorsqu'il est saturé. Cette fréquence de renouvellement est de une fois par jour en cas de détersion de débris fibrino-nécrotiques et de plaie fortement exsudative ou infectée, à tous les 2 jours en cas de plaie moyennement exsudative.

• **Retrait du pansement :** Oter le pansement secondaire et retirer **UrgoSorb**. Dans l'ulcère de jambe, **UrgoSorb** peut être humidifié à l'aide de sérum physiologique pour en faciliter le retrait. Appliquer un nouveau pansement **UrgoSorb** comme précédemment décrit.

• **Utilisation d'**UrgoSorb** mèche :** Pour les plaies cavitaires et profondes (escarres anfractueuses) appliquer **UrgoSorb** mèche de façon lâche sans exercer de pression excessive. En se gélifiant, **UrgoSorb** mèche se conforme aux parois de la cavité. **UrgoSorb** mèche se retire facilement d'un seul tenant. S'assurer du retrait de la totalité de la mèche dans la plaie. Utiliser les mêmes techniques de pansement secondaire qu'avec **UrgoSorb** compresse.

## CONTRE-INDICATIONS

Mèche endo-nasal en chirurgie rhino sinusienne. Plaque de nécrose sèche de l'escarre. Brûlures profondes, brûlures de 3e degré. Plaies peu exsudatives. Sensibilité connue au pansement.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Non résorbable, **UrgoSorb** ne doit pas être utilisé comme compresse chirurgicale implantable.

• Ne pas associer les pansements **UrgoSorb** avec des solutions antiseptiques alcalines (incompatibilité physico-chimique). En cas d'utilisation, rincer la plaie avec du sérum physiologique avant d'appliquer **UrgoSorb** compresse et mèche.

• Conditionnement individuel stérile à usage unique: La réutilisation d'un pansement à usage unique peut provoquer des risques d'infection.

• (\*) Vérifier l'intégrité du protecteur de stérilité avant usage. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

• Ne pas re-stériliser.

EN

COMPRESS AND ROPE  
ALGinate / HYDROCOLLOID ABSORBENT DRESSING

## DESCRIPTION

**UrgoSorb** is a sterile dressing composed of calcium alginate fibres and hydrocolloid particles (sodium carboxymethylcellulose), natural polymers known for their high absorbency.

## PROPERTIES

**UrgoSorb** is a dressing which promotes wound healing by means of its components forming a gel on contact with wound exudate.

**UrgoSorb** provides pain-free dressing change and can be removed easily and in one piece, even when wet.

## INDICATIONS

**WOUND HEALING:** **UrgoSorb** is a dressing intended for local treatment of moderate to highly exuding wounds, particularly for sloughy and granulating wounds: Post surgical wounds (amputation stumps, cavity wounds...). Chronic wounds (pressure ulcers, leg ulcers...). **UrgoSorb** can be used on wounds with signs of clinical infection under medical supervision. **UrgoSorb** is also intended for moderate to heavily exuding wounds. **UrgoSorb** rope is intended for the local management of moderate to heavily exuding cavity (deep eschars, pilonidal sinus) wounds.

**HAEMOSTASIS:** Through platelet activation, **UrgoSorb** is a dressing which promotes primary haemostasis and can control minor bleeding in superficial acute and chronic wounds, through the natural haemostatic properties of calcium alginate.

[illegible]



**locamed**

Santé &amp; Confort

**MATÉRIEL MÉDICAL**

Facture: FN22-075758

CASABLANCA Le, 09/05/2022

DEPOT CASA PV  
Agent commercial : FATIMA.325  
Mode de règlement :

ESPECE : 180.45

ICE CLIENT :  
INP CLIENT :  
N° CLIENT : C22-0050900  
MR MOUSSAME MOHAMED

CASA  
0693982554

Code Article	Code TVA	Désignation	Qté	P.U.TTC	Remise %	P.U. Net TTC	Montant TTC
680008	20	PROTEGE TALON - PAIRE	1	180.00	0	180.00	180.00

Code	Base	Taux	Montant
20	150.00	20	30.00
Total	150.00		30.00

Total HT 150.00

Total TVA 30.00

Droit timbre 0.45

Total TTC 180.45

Arrêtée la présente Facture à la somme de  
TTC:

**CENT QUATRE-VINGTS DIRHAMS  
QUARANTE-CINQ CENTIMES.**

Call Center 05 37 63 27 28 / 05 22 86 22 22 - info@locamed.ma - www.locamed.ma

LOCAMED SERVICE S.A.R.L AU CAPITAL 17.800.000 DHS - C.N.S.S : 2445642 - R.C. : 30269 - Patente : 25103476 - I.F. : 3315150

Siège Social : 11, rue Mamounia (ex CTM) - Rabat Siège Administratif : Angle Av. Med VI et Av. El Haouz - Rabat - Maroc

Tél. : 05 37 63 08 07 / 05 37 63 26 00 - Fax : 05 37 63 00 86 - ICE : 001526686000016 - info@locamed.ma - www.locamed.ma

**CASABLANCA**

Arjoun: 7, rue Lahcen Arjoun (face hôpital 20 Août), quartier des Hôpitaux.

Tél. : 05 22 86 39 89 / 05 22 86 16 83 / 05 22 86 37 17

Ghandi: 60, Boulevard Ghandi, quartier Essalam Tél. : 05 22 94 20 43 / 05 22 86 22 22

Goulmima: 627, rue Goulmima Casa-Anfa (à proximité hôpital My Youssef) Tél. : 05 22 20 20 98 / 05 22 20 21 04

Hôpitaux: 46, rue des hôpitaux. Tél. : 05 22 47 63 70 / 05 22 47 48 30

**RABAT**

Arribat Center: Av. Nations-Unies, Al Abtal, Inaouin et Omar Ibn Al Khattab, Agdal. Tél. : 05 37 68 13 12

Zaer: Angle Av. Mohammed VI et Av. El Haouz. Tél. : 05 37 63 27 28 / 05 37 63 26 05

Mamounia: 4, rue Mamounia (ex CTM) - Rabat. Tél. : 05 37 63 08 07 / 05 37 63 26 00

**MOHAMMEDIA** Magasin N°4 immeuble B, place Mohammed V, résidence du Centre. Mohammedia Tél. : 05 23 31 71 84**MARRAKECH** Avenue, Yaacoub el Mansour N°: 2 Résidence Ahlam Guéliz (près de centre Américain) Tél. : 05 24 43 15 00 / 05 24 43 14 30**AGADIR** Marjane Agadir, Avenue Mohammed V, Founty, Agadir Tél. : 05 28 38 67 49**KÉNITRA** Angle Avenue Ahmed Diori et Avenue Moulay Abderrahmane Tél. : 05 37 36 74 28 / 05 37 37 74 75**FÈS** Angle Av. des FAR et rue Ahmed Chibhi (en face de central banque chaabli) Tél. : 05 35 62 51 62 / 05 35 62 51 61**MEKNÈS** 16, Avenue Amir Moulay Abdellah Manzeh, Meknes (à côté de Polyclinique Alaoui) Tél. : 05 35 52 83 13**TANGER** 6, résidence Saghinia2, Av. Sidi Mohamed Ben Abdellah Quartier Iberia. Tanger Tél. : 05 39 33 55 40 / 05 39 37 23 47





PHARMACIE ES-SAADA Sarl

Dr. Mounib Mohammed

FACTURE

Page :1

N° FACTURE :324971

Date : 15/06/2022

Client :

MOUSSAME MOHAMED

Désignation Produits	Quantité	P.V	Total	TVA%
URGOSORB 10*10CM	3	288.00	864.00	20

Taux	0%	7%	20%
MT HT	0.00	0.00	720.00
MT TVA	0.00	0.00	144.00

Total HTVA	720.00
Total TVA	144.00
Total TTC	864.00

Arrêtée La Présente Facture à La Somme De : HUIT CENT-SOIXANTE-QUATRE DHS

Bon rétablissement

IDENTIFIANT FISCAL 20727328 ICE 001835204000002 RC366309

TEL 0522625413 -0522620353 FAX 0522625413

PHARMACIE ES-SAADA  
CASABLANCA SARL AU  
2 AV. AL FATHA  
Tél: 05 22 62 03 53 / 62 54 13  
Dr. Mounib Mohammed